



# BEZRĘCIOWY TERMOMETR INTEC GA-02

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

Termometr INTEC GA-02 nie zawiera rtęci. Został wypełniony innowacyjnym stopem galu, indu i cyny – galinstanem, który jest nietoksyczny, a posiada właściwości pomiarowe rtęci.

Dzięki szklanej obudowie jest łatwy w czyszczeniu i tym samym higieniczny, a także antyalergiczny, ponieważ nie zawiera PCV, niklu itp.

Termometr jest w pełni ekologiczny – nie zawiera rtęci, baterii, elektroniki. Obudowa jest szklana.

Przed użyciem należy upewnić się czy słupek cieczy w kapilarze znajduje się poniżej poziomu 36°C na skali. Jeśli nie, należy go strząsnąć, aż znajdzie się poniżej tego poziomu.

Termometrem bezręciowym INTEC GA-02 można zmierzyć temperaturę ciała na 3 sposoby:

### **Pomiar pod pachą – czas pomiaru: min. 4 minuty**

Skórę pod pachą należy osuszyć przed pomiarem. Umieść termometr w dole pachowym i dociśnij ramię do tułowia, aby zamknąć szczelnie dół pachowy. Nie dociskaj zbyt mocno, aby nie uszkodzić termometru.

### **Pomiar w ustach (metoda oralna) – czas pomiaru: min. 2 minuty**

Termometr włóż do ust i umieść jego końcówkę pod językiem po lewej lub prawej stronie. Zamknij usta na czas pomiaru, aby zapewnić szczelność. Nie gryź termometru.

### **Pomiar w odbycie (metoda rektalna) – czas pomiaru: min. 1 minuta**

Końcówkę termometru przed pomiarem można posmarować np. olejkami dla niemowląt w celu łatwiejszej aplikacji i wsunąć ją do odbytu (na głębokość ok. 2 cm). Uwważaj, aby nie złamać termometru.

Po dokonaniu pomiaru wynik można odczytać na skali termometru.

Po pomiarze i przed umieszczeniem termometru w etui należy go dokładnie umyć.

## **STRZAŚNIENIE**

Zaleca się strząśnięcie cieczy w kapilarze natychmiast po pomiarze, gdyż jest to wtedy najłatwiejsze.

W celu strząśnięcia płynu należy złapać górną część termometru palcem wskazującym i kciukiem i kilkukrotnie energicznie strząsnąć słupek cieczy poniżej poziomu 36°C.

## **UWAGA:**

- Na 30 minut przed dokonaniem pomiaru nie należy brać kąpieli, palić papierosów ani jeść.
- Nie zaleca się dokonywania pomiaru metodą oralną u dzieci poniżej 10 roku życia.
- Podczas pomiaru w ustach należy zachować spokój, nie rozmawiać, gryźć termometru i nie ruszać się.
- Podczas pomiaru metodą rektalną u dzieci należy wsunąć termometr do odbytu na głębokość ok. 2 cm i trzymać go w tej pozycji tak, aby termometr nie wysunął się ani nie wsunął zbyt głęboko. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności, aby termometr nie złamał się podczas pomiaru.
- Termometru nie wolno zanurzać ani myć w wodzie o temperaturze wyższej niż jego maksymalny zakres pomiarowy.
- Termometr należy przechowywać z dala od źródeł ciepła lub miejsc narażonych na działanie promieni słonecznych.
- Termometr nie jest zabawką. Należy go przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.

### **Warunki działania:**

- Zakres pomiaru wynosi 32°C – 42°C. W celu uzyskania wiarygodnych wyników temperatura otoczenia powinna znajdować się w zakresie 20°C – 30°C.
- Dokładność wynosi 0,1°C.
- Produkt jest zgodny z normą EN12470-1:2000 - Termometry lekarskie, część 1. Termometry szklane wypełnione cieczą metaliczną, wskazujące maksimum.
- Termometr został wyprodukowany zgodnie z wymogami Dyrektywy 93/42/EWG dotyczącej wyrobów medycznych i otrzymał znak CE 0197.

 **WEGA Handel GmbH**  
**Herbert-Jensch-Str. 111**  
**15234 Frankfurt (Oder)**  
**NIEMCY**

**Dystrybutor w Polsce:**  
**Intec Medical Sp. z o.o.**  
**ul. L. Podbiłęty 7**  
**31-980 Kraków**

**CE**<sub>0197</sub>

Data publikacji Instrukcji Obsługi 19.06.2019 r.  
V.INTEC01/115

## **GWARANCJA DYSTRYBUTORA**

Gwarancja jest udzielana na okres 24 miesięcy i swoim zasięgiem obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, licząc od daty zakupu potwierdzonej rachunkiem nabywcy. Gwarancji nie podlega opakowanie, uszkodzenie sprzętu powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania, przechowywania, konserwacji, wszelkie uszkodzenia mechaniczne.

Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w Sprzęcie w momencie zakupu.

Zgłoszenie reklamacji można dokonać za pośrednictwem miejsca w którym dokonano zakupu, bądź też bezpośrednio u Gwaranta (Serwis Intec Medical Sp. z o.o., ul. L. Podbiłęty 7, 31-980 Kraków, e-mail: [serwis@intecmedical.pl](mailto:serwis@intecmedical.pl), tel.: 12 376 81 15).

Reklamowany wyrób należy dostarczyć do punktu sprzedaży lub bezpośrednio do Gwaranta. Urządzenie powinno znajdować się w opakowaniu chroniącym je przed uszkodzeniami mechanicznymi w trakcie transportu.

Gwarant zapewnia bezpłatne usunięcie wady w terminie 14 dni roboczych od dostarczenia wadliwego wyrobu do serwisu Gwaranta. O sposobie rozpatrzenia reklamacji decyduje wyłącznie Gwarant. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Gwarancją mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Data sprzedaży, podpis i pieczęć Sprzedawcy: